

Family Health
Self Test

Questo test fornisce unicamente un'analisi preliminare. L'utente è l'unico responsabile della decisione di mettersi alla guida.

Alcol Test

INSERIRE IL TAMPONE IN BOCCA PER 10 SECONDI IMPREGNANDOLO DI SALIVA. LEGGERE IL RISULTATO DOPO 4 MINUTI CONFRONTANDO IL COLORE DEL TAMPONE CON LA SEGUENTE SCALA DEI RISULTATI.

guida consigliata



0,00 g/l



0,50 g/l



0,80 g/l



1,50 g/l

Prima di effettuare il test portarlo ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 30°C. Conservare tra i 2° ed i 30°C. Non introdurre nulla in bocca, inclusi cibo, bevande, tabacco, chewing-gum per almeno 10 min. Prima di effettuare il test. Non leggere il risultato dopo 10 minuti. Tenere il test fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Test qualitativo indicativo. Prodotto non destinato per uso medico o diagnostico.

Distribuito da:
Screen Italia Srl

Via dell'Artigianato, 16
06089 - Torgiano - Perugia - Italia
www.familyhealthselftest.it

